


MATERIAIS FORNECIDOS

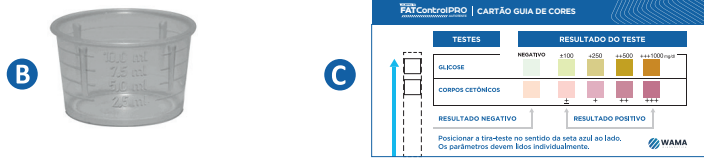

LEGENDA

- A** Sachê de Alumínio contendo tira-teste
- B** Frasco coletor (reutilizável)
- C** Cartão Guia de Cores

PROCEDIMENTOS PARA O TESTE


IMPORTANTE: Siga as instruções de uso conforme o passo a passo neste **GUIA**. O **kit** deve ser manuseado de forma correta para que não seja comprometido o resultado do teste. Tenha papel absorvente e um relógio ou cronômetro em mãos (itens não fornecidos).

Passo 1: Realize o teste em uma superfície limpa, plana e seca. Será necessário utilizar papel absorvente e cronômetro (materiais não fornecidos).

ATENÇÃO: Não abra o sachê de alumínio contendo a tira-teste antes de coletar a amostra.


Passo 2: Para a coleta, limpe a região genital com água e sabão neutro. Seque a região com papel macio. Despreze o primeiro jato de urina e colete o segundo jato em um frasco limpo, seco e livre de sabão. Transfira parte da amostra para o **Frasco Coletor**.

Transfira a urina para o frasco coletor

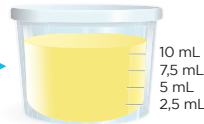


Passo 3: Abra o sachê de alumínio e retire a **tira-teste** de seu interior. Verifique se há dois parâmetros (quadrados coloridos) na **tira-teste**, um de coloração azul (glicose) e outro de tom róseo claro (corpos cetônicos). Além disso, a tira-teste deve estar como na figura abaixo, sem manchas ou alterações de cores. Caso observe qualquer alteração descarte o teste.


ATENÇÃO: O sachê de sílica que acompanha a tira-teste é apenas para conservação do teste. Não utilizar!

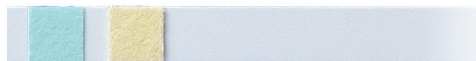

Passo 4: Mergulhe a **tira-teste** na amostra de urina recém-coletada por **02 segundos** e retire em seguida. Tenha certeza de que ambos os parâmetros (quadrados coloridos) foram completamente imersos na urina.

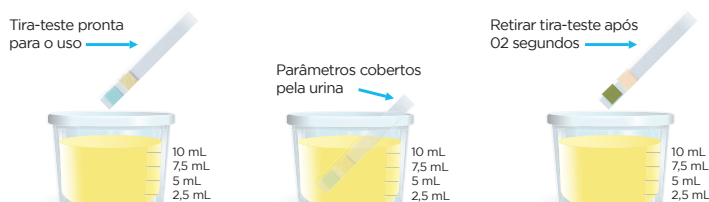

Passo 5: Encoste delicadamente a lateral da **tira-teste** no papel absorvente para retirar o excesso de urina. Coloque a **tira-teste** na horizontal e acione o cronômetro pelo tempo de **1 minuto**.

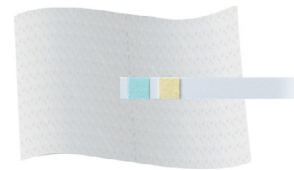

Passo 6: Após o tempo de **1 minuto**, faça a leitura imediata dos resultados, comparando a cor de cada um dos parâmetros com as cores presentes no **CARTÃO GUIA DE CORES** (item C) que acompanha o **kit**. Cada cor representará uma concentração diferente para a glicose e corpos cetônicos, portanto verifique qual cor se assemelha aos parâmetros do seu teste.

FATControlPRO CARTÃO GUIA DE CORES	
TESTES	RESULTADO DO TESTE
GLICOSE	<div>NEGATIVO</div> <div>±100</div> <div>+250</div> <div>++500</div> <div>+++1000mg/dl</div>
CORPOS CETÔNICOS	<div>±</div> <div>+</div> <div>++</div> <div>+++</div>
<div>RESULTADO NEGATIVO</div> <div>RESULTADO POSITIVO</div>	
Posicionar a tira-teste no sentido da seta azul ao lado. Os parâmetros devem lidos individualmente.	

ATENÇÃO: Siga o tempo de leitura indicado para a exatidão dos resultados. Não considerar resultados interpretados após este tempo.

EM CASO DE RESULTADO POSITIVO, PROCURE O SEU MÉDICO.

ARMAZENAMENTO: Conservar em local fresco (temperatura entre 15°C a 30°C). Não congelar. Evitar lugares com altas temperaturas e úmidos.



SAC: 0800 772 9977 e 16 98224-9977
PLANTÃO 24 HORAS

WAMA Diagnóstica
Rua Aldo Germano Klein, 100 - CEAT
CEP: 13573-470 - São Carlos - SP - Brasil
Fone: +55 16 3377.9977
www.wamadiagnostica.com.br
Resp.Téc.: Leise Dalana Martins CRBM - SP: 21.949
Registro ANVISA - MS N°: 10310030242
Edição I: 05/2024